



HURTIGSTARTVEJLEDNING TIL ARGOS-HJERTEMÅLEREN

1. Sådan aktiverer du procentvis ændring:

- Tryk på den ønskede parameter (CO, SV, osv.).
- Tryk på **"Show % change"** (Vis procentvis ændring), og sørg for, at det markeres med .
- Tryk på **"Save"** (Gem).

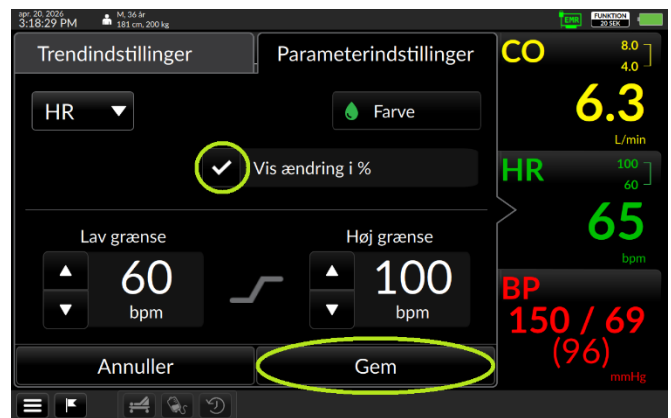


2. Der vises et procenttal ved siden af den eller de relevante parametre, der angiver stigningen eller faldet i procent i den målte værdi siden det seneste flag.

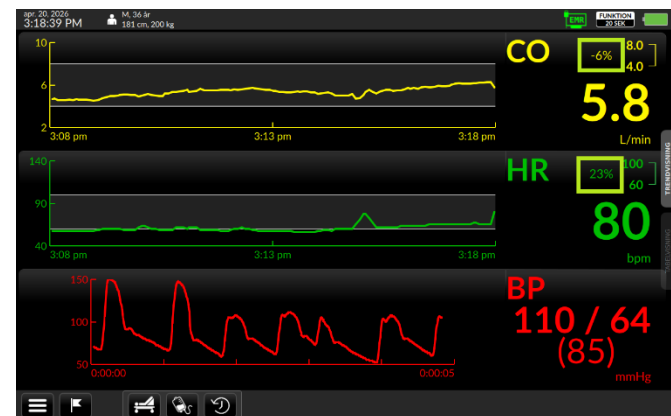


3. Sådan markerer du en intervention (BOLUS, PLR, osv.):

- Tryk på **flagikonet** nederst til venstre på skærmen.
- Brug skærmtastaturet til at beskrive den markerede hændelse.
- Tryk på **"Save"** (Gem) - der vises et flag på alle trendskræmme og % change (Procentændring) opdateres, så ændringen i procent vises siden den seneste markering.
- Dette er relevant for enten at indtaste **starten** eller **slutningen** for interventioner.

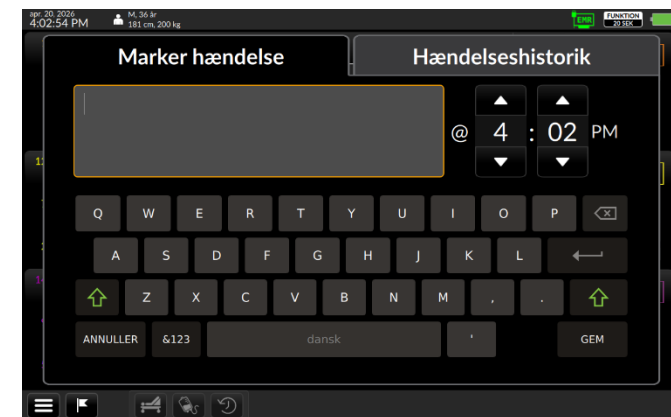


4. Sådan får du vist trendværdier:

- Hold fingeren på trendkurven, indtil den grå markør vises.
- Den grå markør kan trækkes frem og tilbage langs trendkurven for at få vist specifikke parameterværdier og markeret tekst.

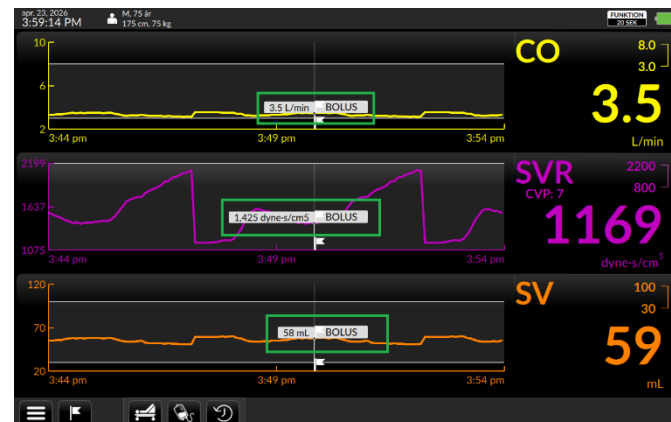

HURTIGSTARTVEJLEDNING TIL ARGOS-HJERTEMÅLEREN

5. Sådan gennemgår eller redigerer du en markeret intervention/hændelse:

- Tryk på .
- Tryk på “**Event History**” (Hændelseshistorik), og vælg den specifikke hændelse, der skal gennemgås/redigeres. Hændelsens tidspunkt og/eller beskrivelse kan derefter redigeres.
- Tryk på “**Save**” (Gem) for at gemme ændringer.

