
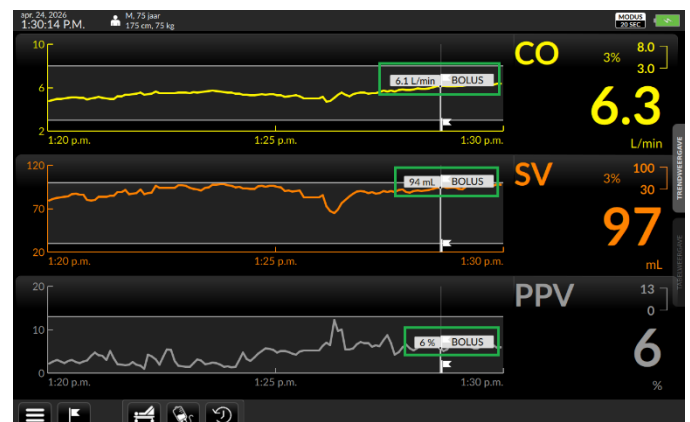
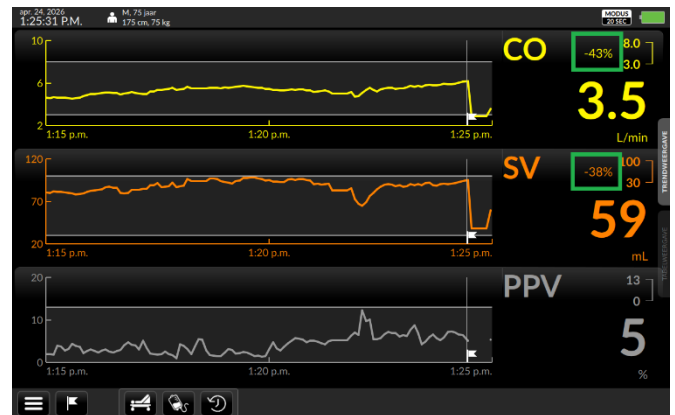
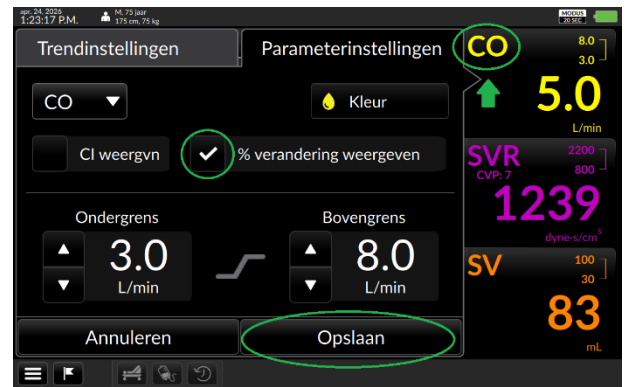



VERKORTE HANDLEIDING VOOR HET MARKEREN MET VLAGGEN VOOR DE ARGOS CARDIAC OUTPUT-MONITOR

- Om % verandering te activeren:
 - Tik op de gewenste parameter (CO, SV etc.).
 - Tik op 'Show % change' (% verandering tonen) en zorg dat dit is gemarkeerd met een .
 - Tik op 'Save' (Opslaan).
- Een **percentage** verschijnt naast de relevante parameter(s) dat de procentuele verhoging of verlaging van de meetwaarde sinds de meest recente vlag aangeeft.
- Om een interventie (BOLUS, PLR etc.) met een vlag te markeren:
 - Tik op het pictogram **Vlag**  linksonder op het scherm.
 - Gebruik het toetsenbord op het scherm om de met een vlag gemarkeerde gebeurtenis te beschrijven.
 - Tik op 'Save' (Opslaan) - een vlag verschijnt op alle trendschermen en **% change** (% verandering) wordt bijgewerkt en komt overeen met de % verandering sinds de meest recente vlag.
 - Dit geldt voor het invoeren van de **start** of het **einde** van interventies.
- Om trendwaarden te bekijken:
 - Tik op en houd uw vinger op de trendgolfvorm totdat de grijze cursor verschijnt.
 - De grijze cursor kan heen en weer langs de trendgolfvorm worden verslept om specifieke parameterwaarden en met een vlag gemarkeerde tekst te bekijken.



VERKORTE HANDLEIDING VOOR HET MARKEREN MET VLAGGEN VOOR DE ARGOS CARDIAC OUTPUT-MONITOR

5. Om een interventie/gebeurtenis die met een vlag is gemarkeerd te bekijken of bewerken:
- Tik op .
 - Tik op 'Event History' (Gebeurtenisgeschiedenis) en selecteer de specifieke gebeurtenis die u wilt bekijken/bewerken. De tijd en/of beschrijving van de gebeurtenis kan dan worden bewerkt.
 - Tik op 'Save' (Opslaan) om de wijzigingen op te slaan.

