


1. Prosentuaalisen muutoksen käyttöönotto:


- Kosketa haluamaasi parametria (CO, SV tms.).
- Kosketa kohtaa **Show % change** (Näytä %-muutos) ja varmista, että siinä näytetään valintamerkki .
- Kosketa kohtaa **Save** (Tallenna).




2. Asiaankuuluvien parametrien vieressä näytetään prosentti luku, joka ilmoittaa mitatun arvon prosentuaalisen kasvun tai pienenemisen viimeisimmän lippumerkinnän jälkeen.

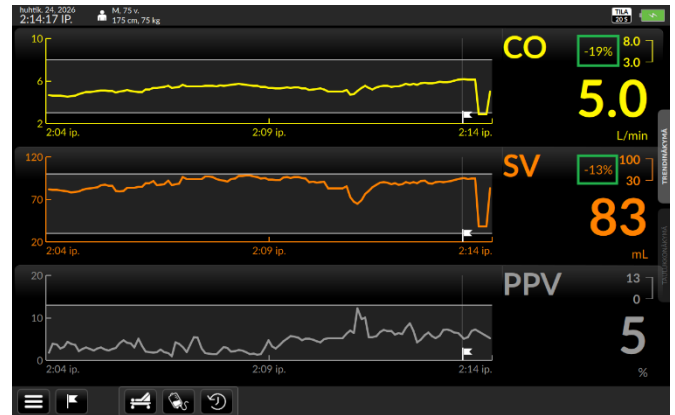


3. Toimenpiteen merkintä (BOLUS, PLR tms.):

- Kosketa **lippukuvaketta**  näytön vasemmassa alakulmassa.
- Kuvaile merkittyä tapahtumaa näyttönäppäimistöä käyttäen.
- Kosketa kohtaa **Save** (Tallenna) -lippumerkintä näytetään kaikilla suuntausnäyttöillä, ja %-muutos päivittyy näyttämään prosentuaalisen muutoksen viimeisimmän lippumerkinnän jälkeen.
- Tällä tavoin voidaan lisätä niin toimenpiteiden **alku** kuin **lopetuskin**.

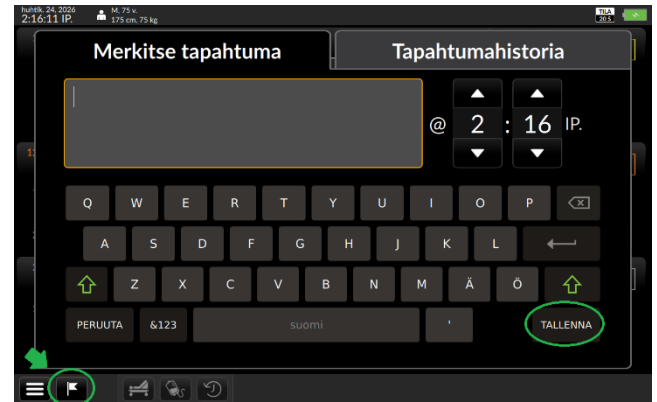


4. Suuntauskaavioiden arvojen tarkastelu:

- Pidä suuntauksen aaltomuotoa painettuna, kunnes näkyviin tulee harmaa osoitin.
- Vedä harmaata osoitinta eteen- ja taaksepäin suuntauskaaviossa, niin näet parametriarvot ja tekstimerkinnät.

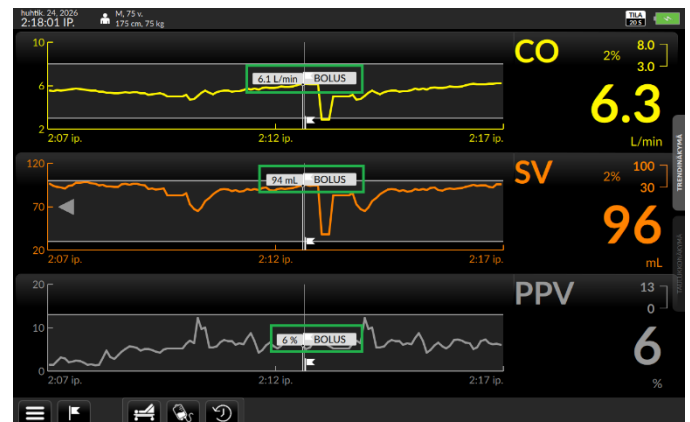

5. Merkityn toimenpiteen/tapahtuman tarkastelu tai muokkaus:

- a. Kosketa kohtaa .
- b. Valitse **Event History** (Tapahtumahistoria) ja valitse tarkasteltava/muokattava tapahtuma. Voit nyt muokata tapahtuman aikaa ja/tai kuvausta.
- c. Tallenna muutokset koskettamalla kohtaa **Save** (Tallenna).

