



GUIDE RAPIDE DES MARQUEURS POUR LE MONITEUR DE DÉBIT CARDIAQUE ARGOS

1. Pour activer l'affichage du changement en % :
 - a. Touchez le paramètre désiré (CO [DC], SV [VES], etc.).
 - b. Touchez « Show % change » (Afficher le % de changement) et assurez-vous qu'il est coché (☑).
 - c. Touchez « Save » (Enregistrer).

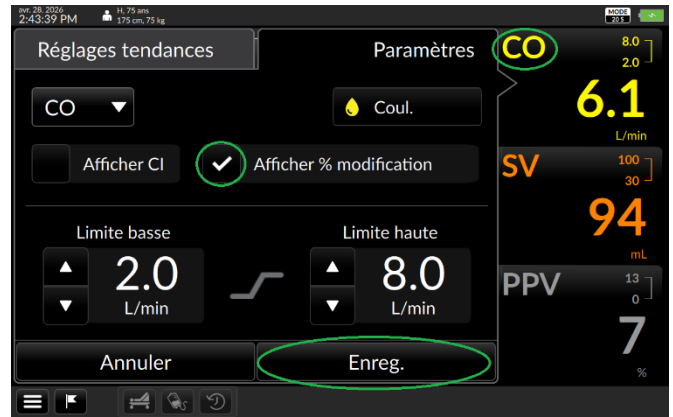


2. Un **pourcentage** s'affiche au regard du ou des paramètres sélectionnés, indiquant le pourcentage d'augmentation ou de diminution de la valeur mesurée depuis le marqueur le plus récent.

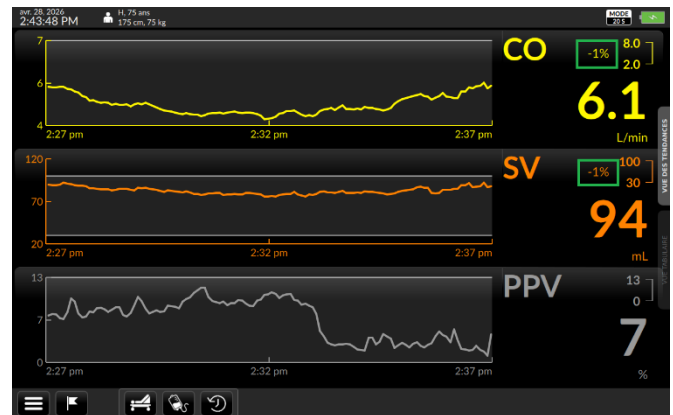


3. Pour marquer une intervention (BOLUS, PLR [LJP], etc.) :
 - a. Touchez l'icône de **drapeau** en bas à gauche de l'écran.
 - b. Utilisez le clavier à l'écran pour décrire l'événement marqué.
 - c. Touchez « Save » (Enregistrer) - un drapeau s'affichera sur tous les écrans de tendance et le **pourcentage de changement** sera mis à jour et reflétera le pourcentage de changement depuis le marqueur le plus récent.
 - d. Cette fonction peut être utilisée pour marquer le **début** ou la **fin** des interventions.



4. Pour afficher les valeurs de tendance :
 - a. Touchez la forme d'onde des tendances et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'un curseur gris s'affiche.
 - b. Le curseur gris peut être glissé d'avant en arrière le long de la forme d'onde des tendances pour afficher les valeurs de paramètres concernés et le texte associé aux marqueurs.

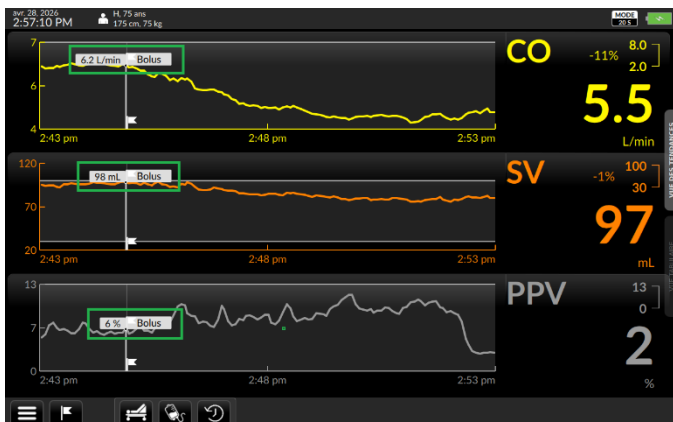

5. Pour examiner ou modifier une intervention/un événement marqué(e) :

- a. Touchez .
- b. Touchez « **Event History** » (Historique des événements) et sélectionnez l'événement à examiner/modifier. L'heure et/ou la description de l'événement peuvent alors être modifiées.
- c. Touchez « **Save** » (Enregistrer) pour conserver les modifications.

