
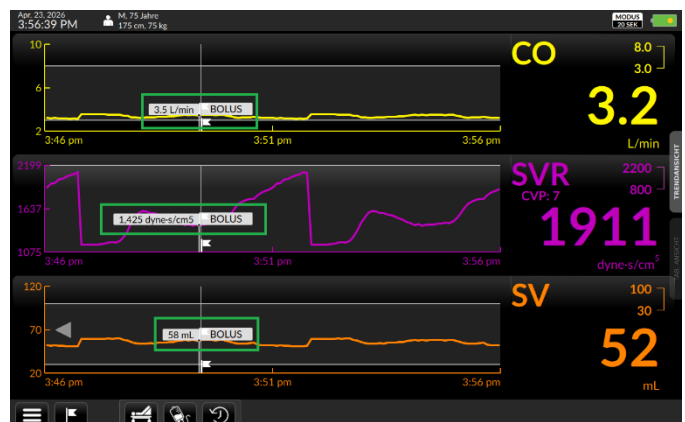
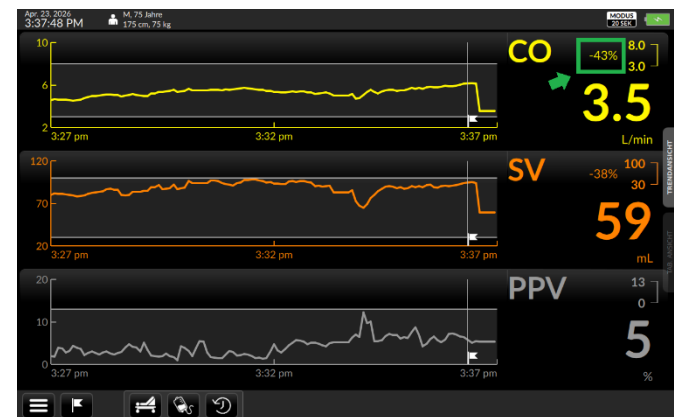
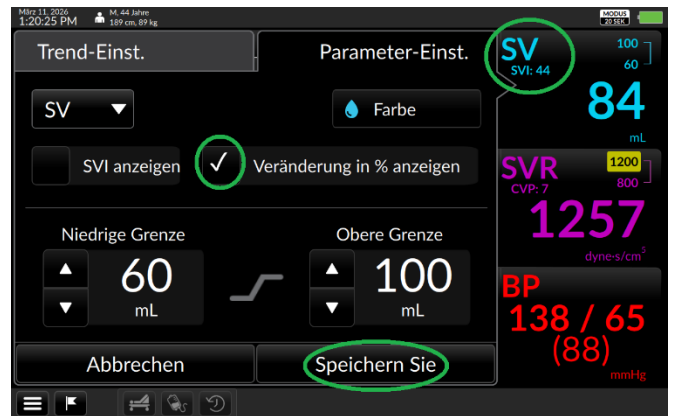



KURZANLEITUNG FÜR KENNZEICHNUNGEN FÜR DEN ARGOS HERZZEITVOLUMEN-MONITOR

- Zur Aktivierung einer % Veränderung:**
 - Auf den gewünschten Parameter (CO, SV usw.) tippen.
 - Auf „**Show % change**“ (% Veränderung zeigen) tippen und sicherstellen, dass die Option mit versehen ist.
 - Auf „**Save**“ (Speichern) tippen.
- Neben dem/den entsprechenden Parameter(n) wird eine **Prozentzahl (%)** angezeigt, die die prozentuale Zu- oder Abnahme des Messwerts seit der letzten Kennzeichnung angibt.
- Zur Kennzeichnung einer Intervention (BOLUS, PLR usw.):**
 - Unten links im Bildschirm auf das **Flaggen-Symbol**  tippen.
 - Mithilfe der Bildschirmtastatur eine Beschreibung des gekennzeichneten Ereignisses eingeben.
 - Auf „**Save**“ (Speichern) tippen - auf allen Trendbildschirmen wird eine Kennzeichnung angezeigt und die **% Veränderung** seit der letzten Kennzeichnung wird aktualisiert.
 - Diese Funktion ist zum Eintragen des **Beginns** bzw. des **Endes** von Interventionen geeignet.
- Zum Anzeigen von Trendwerten:**
 - Mit dem Finger so lange die Trendkurve berühren, bis ein grauer Cursor erscheint.
 - Den graue Cursor lässt sich entlang der Trendkurve hin und her bewegen, um bestimmte Parameterwerte und Kennzeichnungstext anzuzeigen.



5. Zum Überprüfen oder Bearbeiten einer gekennzeichneten Intervention/eines gekennzeichneten Ereignisses:
- Auf  tippen.
 - Auf „**Event History**“ (Ereignishistorie) tippen und das zu überprüfende/zu bearbeitende Ereignis auswählen. Daraufhin können die Uhrzeit und/oder die Beschreibung des Ereignisses bearbeitet werden.
 - Zum Speichern der Änderungen auf „**Save**“ (Speichern) tippen.

