




1. **Ενεργοποίηση αλλαγής %:**
 - a. Αγγίξτε την επιθυμητή παράμετρο (CO, SV κ.λπ.).
 - b. Αγγίξτε την επιλογή «**Show % change**» (Εμφάνιση αλλαγής %) και βεβαιωθείτε ότι έχει επισημανθεί με .
 - c. Αγγίξτε το κουμπί «**Save**» (Αποθήκευση).

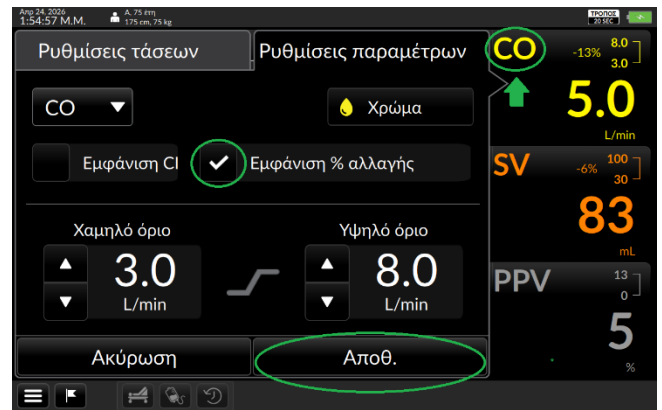


2. Θα εμφανιστεί ένας **αριθμός %** πλάι στην(στις) σχετική(ές) παράμετρο(ους) υποδεικνύοντας την % αύξηση ή μείωση στη μετρούμενη τιμή, από την πιο πρόσφατη σημαία.

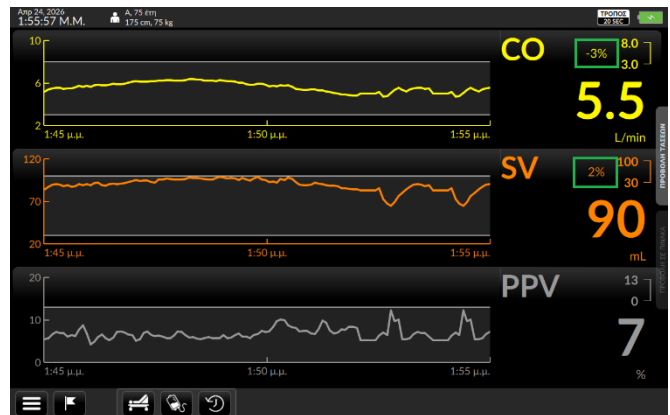


3. **Τοποθέτηση σημαίας σε μια παρέμβαση (BOLUS, PLR κ.λπ.):**
 - a. Αγγίξτε το εικονίδιο με τη **Σημαία** στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.
 - b. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να περιγράψετε το συμβάν για το οποίο τοποθετείται σημαία.
 - c. Αγγίξτε το κουμπί «**Save**» (Αποθήκευση) - θα τοποθετηθεί μια σημαία σε όλες τις οθόνες τάσης και η **αλλαγή %** θα ενημερωθεί και θα αντικατοπτρίζει την αλλαγή % από την πιο πρόσφατη σημαία.
 - d. Αυτό προορίζεται για την καταχώριση Έναρξης ή της Λήξης των παρεμβάσεων.

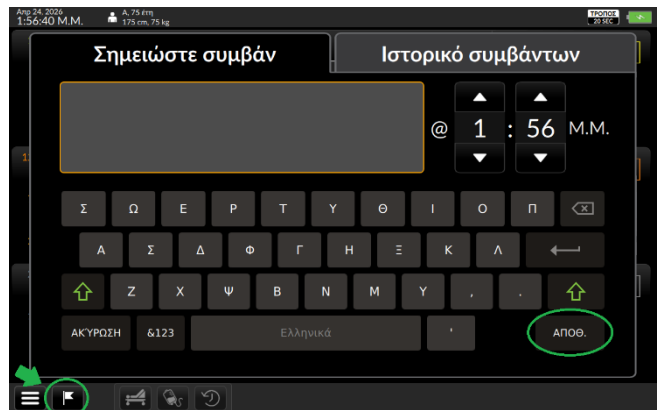

4. **Προβολή των τιμών τάσεων:**
 - a. Αγγίξτε παρατεταμένα την κυματομορφή της τάσης, ωστόσο εμφανιστεί ο γκριζος δείκτης.
 - b. Μπορείτε να σύρετε τον γκριζο δείκτη μπροστά και πίσω στην κυματομορφή της τάσης, για προβολή συγκεκριμένων τιμών παραμέτρων και κειμένου με σημαία.

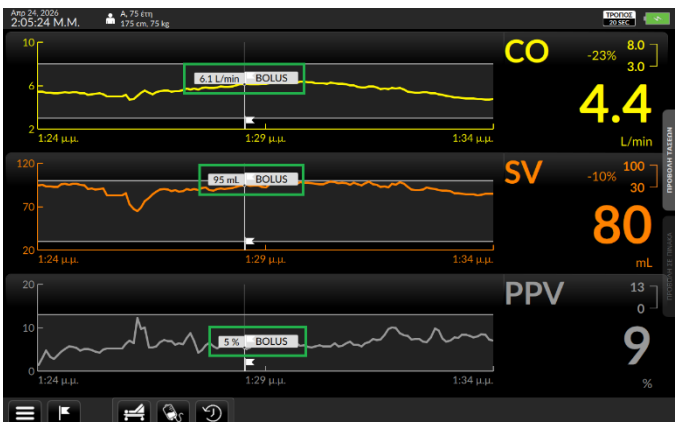

5. Ανασκόπηση ή Επεξεργασία μιας παρέμβασης/συμβάντος επισημασμένου με σημαία:

- a. Αγγίξτε το .
- b. Αγγίξτε την επιλογή «Event History» (Ιστορικό συμβάντων) και επιλέξτε το συγκεκριμένο συμβάν για ανασκόπηση/επεξεργασία. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει επεξεργασία της ώρας ή/και της περιγραφής του συμβάντος.
- c. Αγγίξτε το κουμπί «Save» (Αποθήκευση) για να διατηρήσετε τις αλλαγές.

