

# GUIDA RAPIDA AGLI INDICATORI PER IL MONITOR PER GITTATA CARDIACA ARGOS


## 1. Per attivare la variazione percentuale:

- Toccare il parametro desiderato (CO, SV e così via).
- Toccare “**Mostra variazione %**” e verificare che l’opzione sia contrassegnata con .
- Toccare “**Salva**”.




## 2. Verrà visualizzato un **valore percentuale (%)**

accanto ai parametri corrispondenti, per indicare l’aumento o la diminuzione percentuale del valore misurato rispetto all’ultimo indicatore.

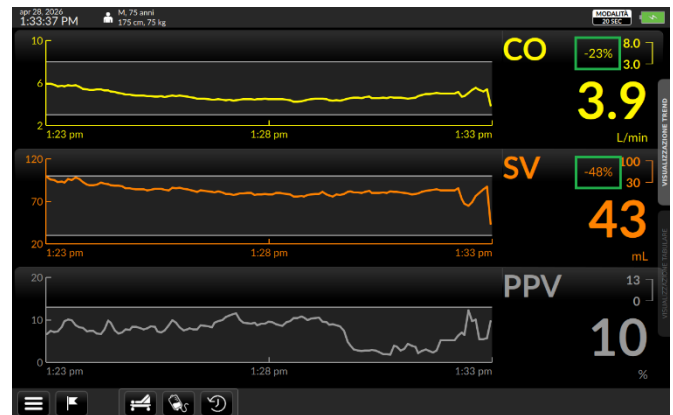


## 3. Per aggiungere un indicatore di intervento (BOLO, PLR e così via):

- Toccare l’icona della **bandiera**  in basso a sinistra sullo schermo.
- Utilizzare la tastiera visualizzata per descrivere l’evento con indicatore.
- Toccare “**Salva**”. Verrà mostrato un indicatore su tutte le schermate dei trend e il valore della **variazione percentuale** si aggiornerà per riflettere la variazione rispetto all’ultimo indicatore.
- Questa operazione è idonea per l’inserimento dell’inizio o della fine degli interventi.




## 4. Per visualizzare il trend dei valori:

- Tenere premuta la forma d’onda del trend finché non appare il cursore grigio.
- Il cursore grigio può essere trascinato avanti e indietro lungo la forma d’onda del trend per visualizzare valori specifici del parametro e il testo con indicatori.

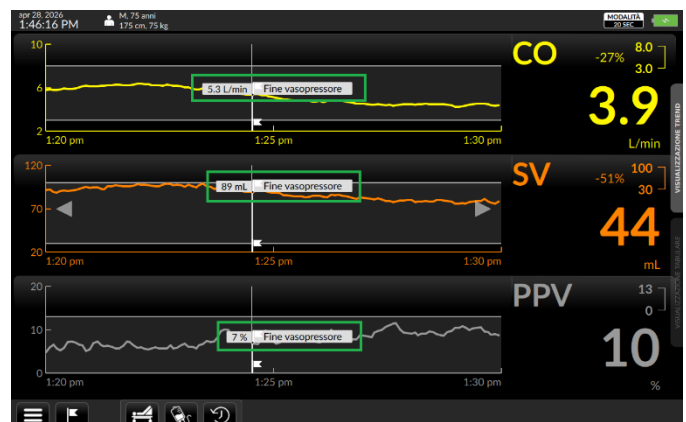

## 5. Per esaminare o modificare un intervento/evento con indicatore:

- Toccare .
- Toccare “**Cronologia eventi**” e selezionare l’evento da esaminare/modificare. Sarà quindi possibile modificare l’ora e/o la descrizione dell’evento.
- Toccare “**Salva**” per mantenere le modifiche.

