



HURTIGVEILEDNING FOR BRUK AV FLAGG I ARGOS MONITOR FOR MINUTTVOLUM

1. Aktivere endring i %:


- Trykk på den ønskede parameteren (CO, SV osv.).
- Trykk på «**Show % change**» (vis endring i %), og påse at det er markert med .
- Trykk på «**Save**» (lagre).

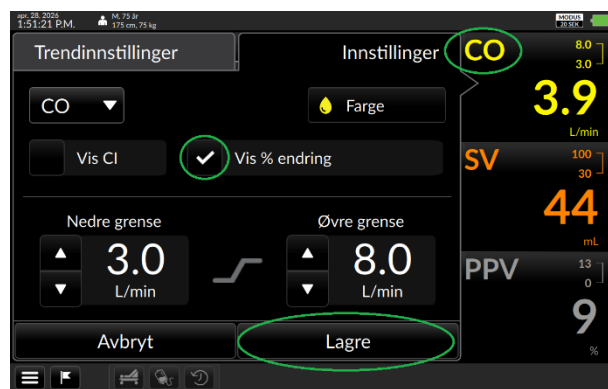

- Et **%-tall** vises ved siden av de(n) relevante parameter(en), og angir økningen eller reduksjonen i % for den målte verdien etter forrige flagging.

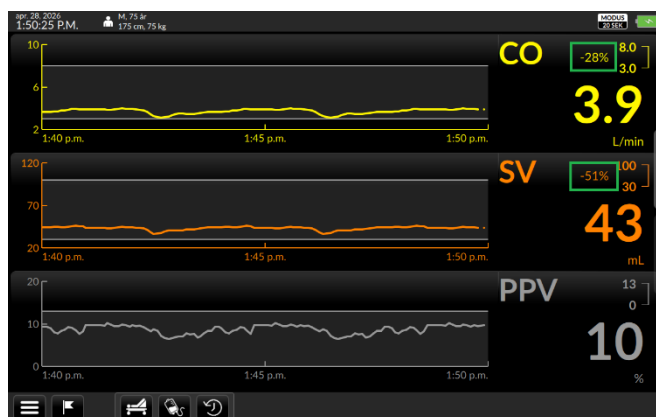


3. Flagge en intervensjon (BOLUS, PASSIV BENHEVING osv.):

- Trykk på **flagg**-ikonet  nederst til venstre på skjermen.
- Beskriv hendelsen som flagges, ved hjelp av tastaturet på skjermen.
- Trykk på «**Save**» (lagre) - et flagg postes i alle trendskjermbilder, og **endringen i %** blir oppdatert og gjenspeiler endringen i % etter forrige flagging.
- Både **starten** og **slutten** på intervensjoner kan markeres på denne måten.




4. Vise trendverdier:

- Trykk med en finger på trendbølgeformen og hold den der til en grå markør vises.
- Den grå markøren kan dras frem og tilbake langs trendbølgeformen for å vise spesifikke parameterverdier og flagget tekst.

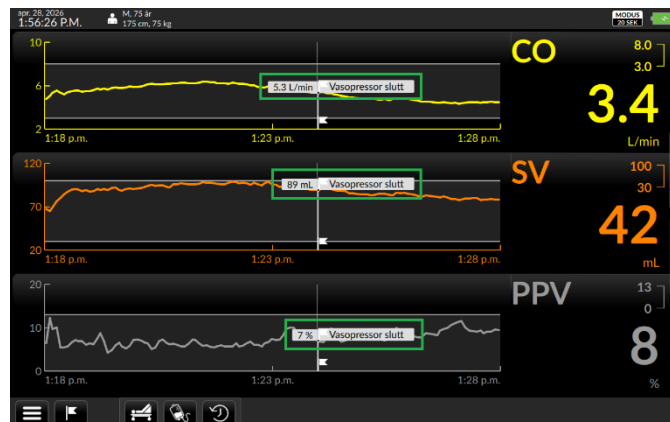

5. Gå gjennom eller redigere en flagget intervensjon/hendelse:

- Trykk på .
- Trykk på «Event History» (hendelseshistorikk), og velg den spesifikke hendelsen du skal gå gjennom/redigere. Du kan nå redigere tidspunktet for og/eller beskrivelsen av hendelsen.
- Trykk på «Save» (lagre) for å beholde endringene.

