
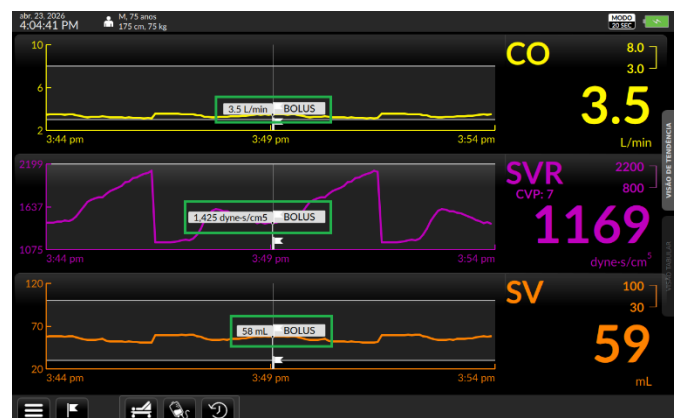
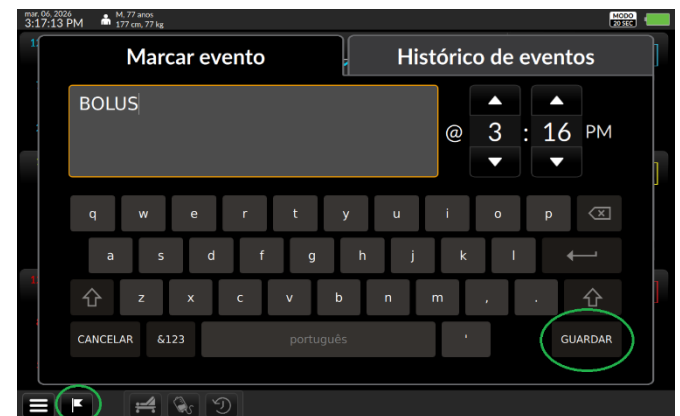
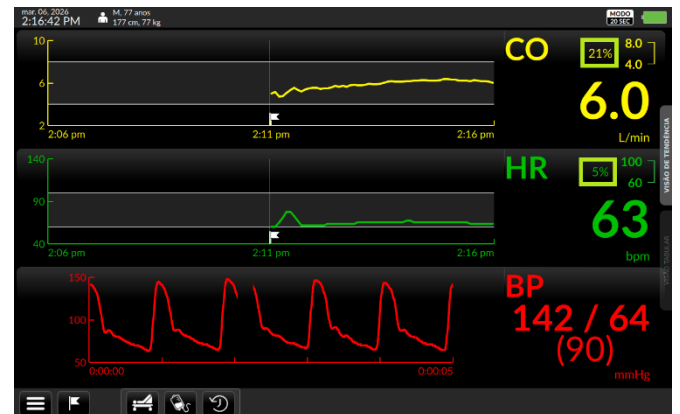



GUIA RÁPIDO DE MARCAÇÃO NO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS

1. Para ativar a **variação percentual**:
 - a. Toque no parâmetro desejado (CO, SV, etc.).
 - b. Toque em **“Show % change”** (Mostrar variação percentual) e certifique-se de que a opção fique marcada com um .
 - c. Toque em **“Save”** (Salvar).
2. Um **número percentual (%)** aparecerá ao lado do(s) parâmetro(s) relevante(s), indicando o aumento ou a diminuição percentual no valor medido desde a marcação mais recente.
3. Como marcar uma intervenção (BOLUS, PLR, etc.):
 - a. Toque no ícone de **marcação**  no canto inferior esquerdo da tela.
 - b. Use o teclado na tela para descrever o evento marcado.
 - c. Toque em **“Save”** (Salvar); uma marcação será exibida em todas as telas de tendência e a **variação percentual** será atualizada, indicando a variação desde a marcação mais recente.
 - d. Este recurso é útil para registrar tanto o **início** quanto o **fim** das intervenções.
4. Como visualizar valores em tendência:
 - a. Toque e segure a forma de onda de tendência até que o cursor cinza apareça.
 - b. O cursor cinza pode ser arrastado para frente e para trás ao longo da forma de onda de tendência para visualizar valores específicos dos parâmetros e textos das marcações.



GUIA RÁPIDO DE MARCAÇÃO NO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS

5. Para ver ou editar um evento/intervenção marcado:

- Toque em .
- Toque em “**Event History**” (Histórico de eventos) e selecione o evento que deseja ver/editar. O horário do evento e/ou a descrição podem então ser editados.
- Toque em “**Save**” (Salvar) para manter as alterações.

