



# GUIA RÁPIDO DE SINALIZAÇÃO NO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS

1. Para ativar a **variação percentual**:
  - a. Toque no parâmetro pretendido (CO, SV, etc.).
  - b. Toque em **“Show % change”** (Mostrar variação percentual) e certifique-se de que a opção fica marcada com um .
  - c. Toque em **“Save”** (Guardar).




2. Um **número percentual (%)** aparecerá ao lado do(s) parâmetro(s) relevante(s), indicando o aumento ou a diminuição percentual do valor medido desde a sinalização mais recente.

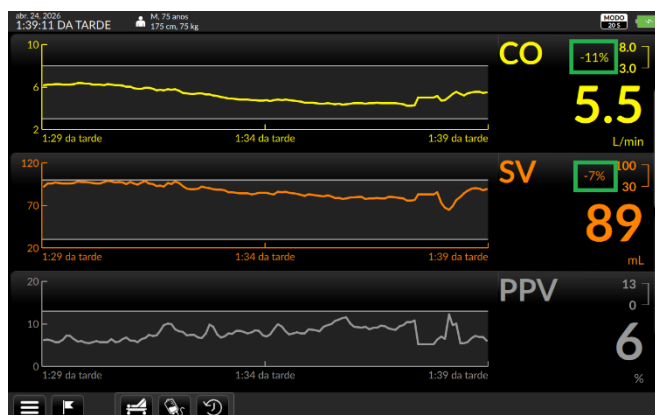

3. Para sinalizar uma intervenção (BOLUS, PLR, etc.):
  - a. Toque no ícone de **sinalização**  no canto inferior esquerdo do ecrã.
  - b. Utilize o teclado no ecrã para descrever o evento sinalizado.
  - c. Toque em **“Save”** (Guardar) – uma sinalização será apresentada em todos os ecrãs de tendências e a **variação percentual** será atualizada, refletindo a variação desde a sinalização mais recente.
  - d. Este recurso é útil para registar o **início** e o **fim** das intervenções.




4. Para visualizar valores em tendência:
  - a. Toque e mantenha o dedo premido sobre a forma de onda de tendência até que o cursor cinzento apareça.
  - b. O cursor cinzento pode ser arrastado para a frente e para trás ao longo da forma de onda de tendência para visualizar valores específicos dos parâmetros e textos das sinalizações.

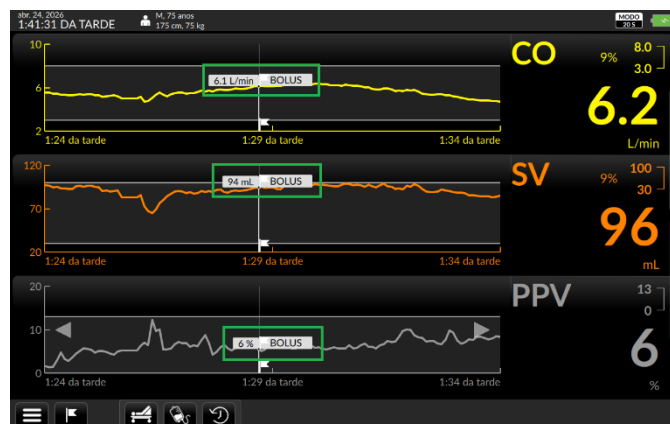

# GUIA RÁPIDO DE SINALIZAÇÃO NO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS

## 5. Para rever ou editar uma intervenção/ evento sinalizado:

- Toque em .
- Toque em “**Event History**” (Histórico de eventos) e selecione o evento que pretende rever/editar. A hora e/ou a descrição do evento podem então ser editadas.
- Toque em “**Save**” (Guardar) para guardar as alterações.

