



GUÍA DE INICIO RÁPIDO SOBRE MARCAS PARA EL MONITOR DE GASTO CARDÍACO ARGOS


1. Para activar el % de cambio:
 - a. Toque el parámetro deseado (CO, SV, etc.).
 - b. Toque **Show % change** («Mostrar % de cambio») y compruebe que está marcado con un símbolo .
 - c. Toque **Save** («Guardar»).




2. Junto a los parámetros correspondientes aparecerá un **número acompañado del símbolo de porcentaje (%)** que indica el aumento o disminución en % del valor medido desde la marca más reciente.

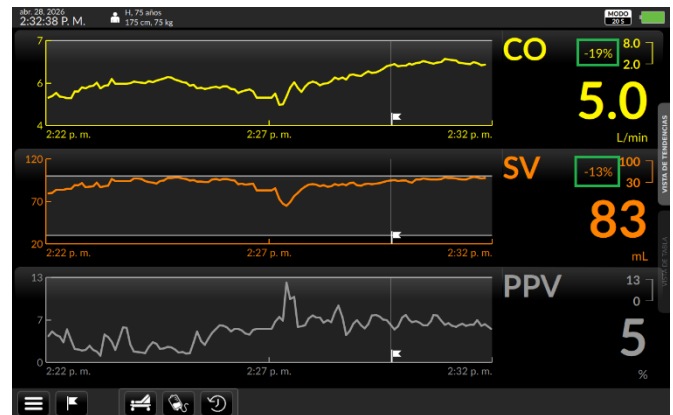


3. Para marcar una intervención (BOLUS, PLR, etc.):
 - a. Toque el icono de la **bandera**  (Marca) en la parte inferior izquierda de la pantalla.
 - b. Use el teclado en pantalla para describir el evento marcado.
 - c. Toque **Save** («Guardar»). Aparecerá una marca en todas las pantallas de tendencias y el **% de cambio** se actualizará para reflejar el valor desde la marca más reciente.
 - d. Este procedimiento permite indicar los valores **iniciales y finales** de las intervenciones.

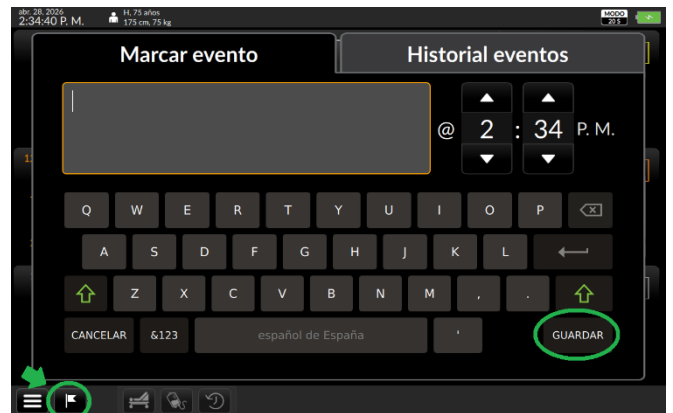

4. Para ver los valores de tendencias:
 - a. Toque y mantenga el dedo sobre la forma de onda correspondiente a la tendencia deseada hasta que aparezca el cursor gris.
 - b. Puede arrastrar el cursor gris adelante y atrás por la forma de onda a fin de ver valores de parámetros específicos y texto marcado.

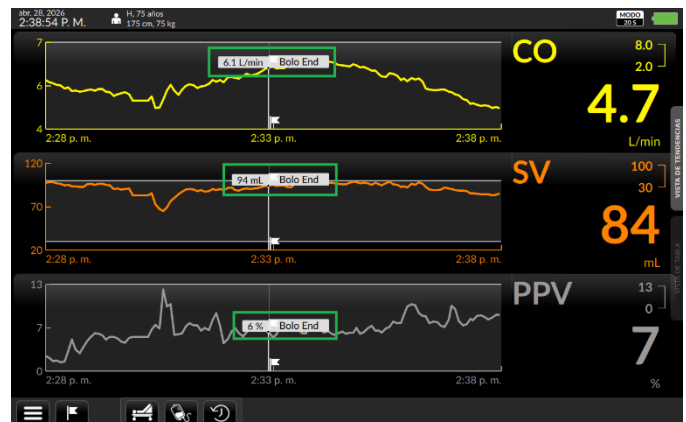

5. Para revisar o editar un evento o intervención que se hayan marcado:
- Toque .
 - Toque **Event History** («Historial de eventos») y seleccione el evento concreto que desee revisar o editar. Una vez hecho esto, se podrá editar la hora o descripción del evento.
 - Toque **Save** («Guardar») para conservar los cambios.

