




SNABBSTART-FLAGGNINGSGUIDE FÖR ARGOS HJÄRTMINUTVOLYMMONITOR

1. För att aktivera % Change (förändring i %):
 - a. Peka på önskad parameter (CO (hjärtminutvolym), SV (slagvolym) etc.).
 - b. Peka på "Show % change" (visa förändring i %) och säkerställ att den är markerad med en .
 - c. Peka på "Save" (spara).

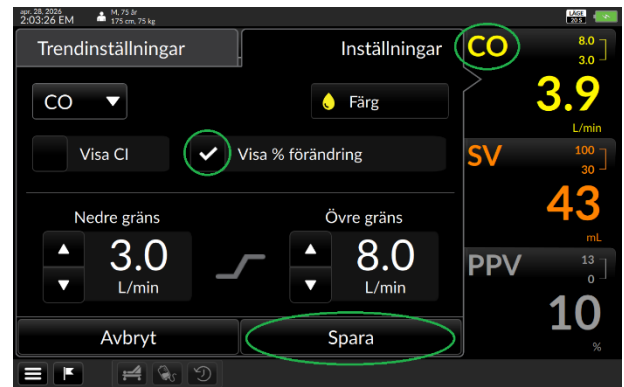


2. En **procentsiffra** visas intill den(de) relevanta parametern(-rarna), som anger ökningen eller minskningen av det uppmätta värdet i % sedan den senaste flaggningen.

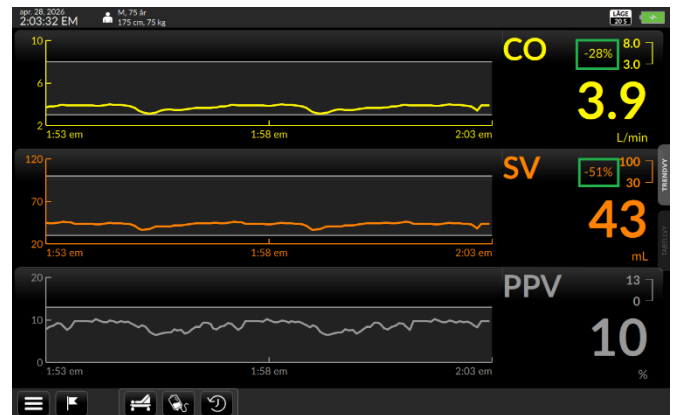


3. För att flagga en intervention (BOLUS, PLR (passiv benhöjning) etc.):
 - a. Peka på **flaggikonen**  längst ned till vänster på skärmen.
 - b. Använd skärmtangentbordet för att beskriva den flaggade händelsen.
 - c. Peka på "Save" (spara) - en flagga visas på alla trendskärmar och **förändring i %** uppdateras och återspeglar förändringen i % sedan den senaste flaggningen.
 - d. Detta är ett lämpligt sätt att föra in antingen **Start** eller **End** (slut) på interventioner.



4. Så här visar du trendade värden:
 - a. Peka på och håll fingret på trendkurvan tills en grå markör visas.
 - b. Den grå markören kan dras fram och tillbaka utmed trendkurvan för visning av specifika parametervärden och flaggad text.

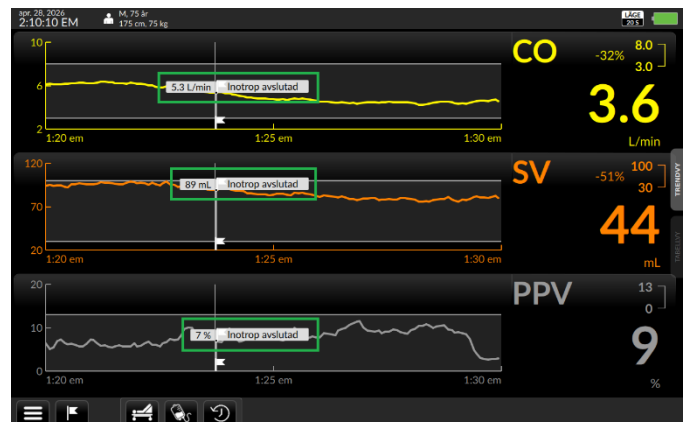

5. Så här granskar eller redigerar du en flaggad intervention/händelse:
- Peka på .
 - Peka på "Event History" (händelsehistorik) och välj den specifika händelsen du vill granska/redigera. Tiden för och/eller beskrivningen av händelsen kan sedan redigeras.
 - Peka på "Save" (spara) för att spara ändringarna.

