

HURTIGSTARTVEJLEDNING TIL ARGOS-HJERTEMÅLEREN

1. **Montering:** Sørg for, at ARGOS-monitoren er monteret korrekt på et stativ, en stang eller en arm, inden den tændes. Tilslut enheden til en fungerende stikkontakt ved hjælp af det medfølgende strøm-kabel.



2. **Tænd:** Tryk på og hold den blå tænd/sluk-knap nede i 5 sekunder. Lad enheden oplade helt, inden den tages i brug. Argos tænder ligesom en computer.

3. Når systemet er startet, vises skærbilledet "Tilføj patientdata". Indtast patientens oplysninger i hvert felt.

Bekræft, at du har indtastet alle patientdata korrekt, og tryk derefter på "Gem".


Bemærk: Du kan trykke på "Brug forrige patient", hvis du vil vende tilbage til den senest monitorerede patient.



4. **Indhentning af blodtrykssignalet:** Patientens eksisterende radiale eller femorale arteriekateter sender blodtrykssignalet til patientmonitoren ved sengen. Der er ikke behov for en ekstra blodtryks sensor eller transducer.



5. **Tilslut ARGOS til sengemonitoren:** Sengemonitoren tilsluttes ARGOS-indgangen ved hjælp af det kabel, der følger med ARGOS.

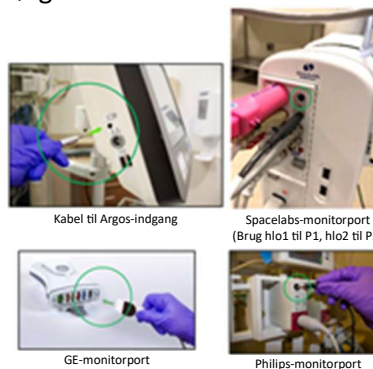

Bemærk: Hvis de viste indstillinger ikke passer til din sengemonitor, bedes du kontakte en Retia Medical-salgsrepræsentant.



Scan efter opstartsvideo




HURTIGSTARTVEJLEDNING TIL ARGOS-HJERTEMÅLEREN

6. Vælg kilde til blodtrykssignal: Vælg monitor ved seng.



7. Trendskræmbilledet vises: For at sikre, at du modtager blodtrykskurven fra sengemonitoren, skal du kontrollere, at patientens blodtrykskurve vises på skærmen.

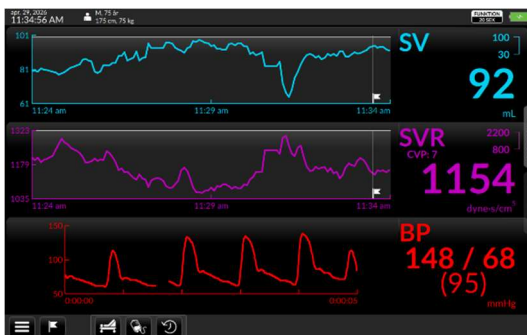

8. Ændring af de viste parametre: For at vælge en anden parameter end den viste, skal du berøre skærmen på en af de tre viste parametre. Vælg den ønskede parameter på rullelisten øverst til venstre, og tryk derefter på "Gem".

9. Flaginterventioner: Tryk på flaget nederst til venstre på skærmen for at markere et indgreb. Indtast navnet på interventionen, og tryk på "Gem" for at følge effekten af din intervention på hver parameter.



10. Sluk for Argos ved at trykke på de tre streger nederst til venstre på skærmen. Vælg "Nedluk".

