

VERKORTE HANDLEIDING VOOR DE ARGOS CARDIALE OUTPUTMONITOR

1. Montage: Zorg dat de ARGOS-monitor stevig is bevestigd aan een standaard, statief of arm voordat u deze inschakelt. Sluit het apparaat aan op een werkend stopcontact met behulp van het meegeleverde netsnoer.



2. Inschakelen: Druk op de blauwe aan/uit-knop en houd deze 5 seconden ingedrukt. Wacht tot het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt. De Argos start op net zoals een computer.

3. Na het opstarten verschijnt het scherm Patiëntgegevens toevoegen. Voer in elk veld de informatie van uw patiënt in. Controleer of u alle patiëntgegevens correct hebt ingevuld en druk dan op Opslaan.


Opmerking: U kunt op Vorige patiënt gebruiken drukken als u wilt terugkeren naar de meest recent bewaakte patiënt.



4. Het bloeddruksignaal ontvangen: De bestaande radiale of femorale arteriële lijn van de patiënt geeft het bloeddruksignaal voor de bedsidemonitor. Een aanvullende bloeddruksensor of -transducer is noodzakelijk.



5. ARGOS aansluiten op de bedsidemonitor: Uw bedsidemonitor wordt aangesloten op de ARGOS-ingangspoort met behulp van de kabel die bij de ARGOS wordt geleverd.

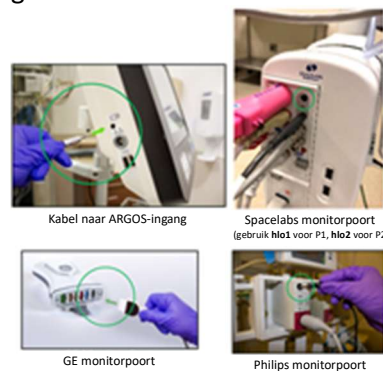

Opmerking: Als de weergegeven opties niet op uw bedsidemonitor van toepassing zijn, raadpleeg dan uw Retia Medical-verkoper.



Scan voor
opstartvideo




VERKORTE HANDLEIDING VOOR DE ARGOS CARDIALE OUTPUTMONITOR

6. Bloeddruksignaalbron selecteren:
Selecteer bedsidemonitor.




7. Het trendscherm verschijnt: Om te bevestigen dat u de bloeddruk golfvorm van uw bedsidemonitor ontvangt, controleert u of de bloeddruk golfvorm van de patiënt op het scherm wordt weergegeven.

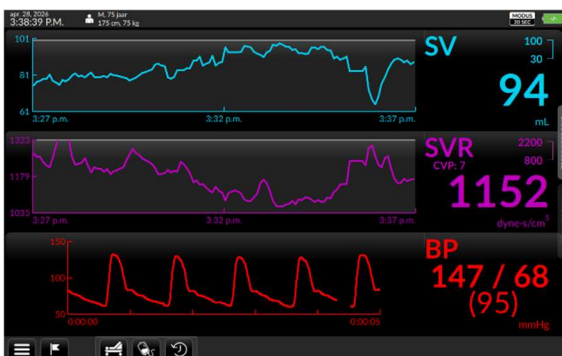

8. De weergegeven parameters wijzigen:
Om een andere parameter dan de weergegeven parameter te selecteren, tikt u op het scherm op een van de drie weergegeven parameters. Gebruik de vervolgmeerkeuzelijst met parameters linksboven om uw gewenste parameter te selecteren en druk dan op Opslaan.

9. Interventies met een vlag markeren:
Tik op de vlag linksonder op het scherm om een interventie te markeren. Voer de naam van de interventie in en druk op Opslaan om het effect van uw interventie voor elke parameter te volgen.

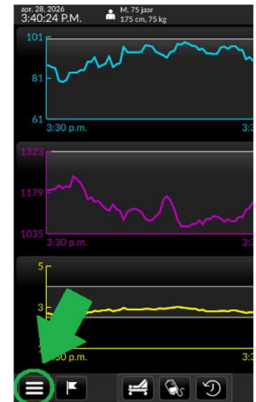

10. Schakel de Argos uit met de drie lijnen linksonder op het scherm. Selecteer Uitschakelen.

