

# SYDÄMEN MINUUTTILAVUUDEN ARGOS-POTILASMONITORIN PIKA-ALOITUSOPAS

1. Kiinnitys: Varmista ennen ARGOS-potilasmonitorin käynnistämistä, että se on kiinnitetty turvallisesti telineeseen, pylvääseen tai varteen. Kytke laite toimivaan verkkovirtapistorasiaan käyttämällä mukana toimitettua virtajohtoa.



2. Virran kytkeminen päälle: Pidä sinistä virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Anna laitteen latautua täyteen ennen käyttöä. Argos-laite käynnistyy tietokoneen tavoin.

3. Käynnistyksen jälkeen näkyviin tulee "Lisää potilastiedot"-näyttö. Syötä potilaan tiedot kuhunkin kenttään.


Tarkista, että olet syöttänyt kaikki potilastiedot oikein, ja paina sitten "Tallenna".

Huomautus: Voit valita Use Previous Patient (Käytä edellistä potilasta), jos haluat palata viimeisimpänä tutkitun potilaan tietoihin.

4. Verenpainesignaalin saaminen: Potilaalle jo asetettu radiaalinen tai femoraalinen valtimoletku välittää verenpainesignaalin potilasvalvontalaitteeseen. Muuta verenpaineilmaisinta tai -anturia ei tarvita.



5. ARGOS-laitteen kytkeä potilasvalvontalaitteeseen: Potilasvalvontalaite liitetään ARGOS-laitteen tuloporttiin ARGOS-laitteen mukana toimitetulla kaapelilla.

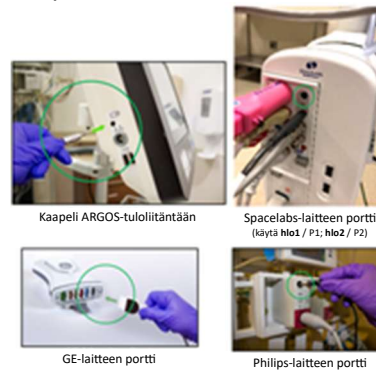

Huomautus: Jos esitetyt vaihtoehdot eivät ole sopivia potilasvalvontalaitteesi kohdalla, ota yhteyttä Retia Medical -myyntiedustajaan.



Skannaa koodi ja katso käynnistystä koskeva video




# SYDÄMEN MINUUTTILAVUUDEN ARGOS-POTILASMONITORIN PIKA-ALOITUSOPAS

6. Valitse Verenpainesignaali -lähde:  
Valitse "Potilasvalvontalaite".



7. Näkyviin tulee suuntausnäyttö: Voit varmistaa verenpaineen aaltomuodon vastaanoton potilasvalvontalaitteesta tarkistamalla, että potilaan verenpaineen aaltomuoto näkyy näytöllä.

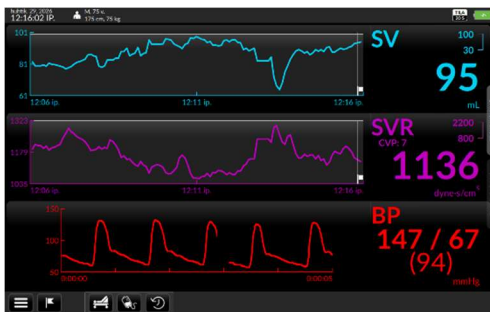

8. Näytettyjen parametrien muuttaminen:  
Voit valita jonkin muun kuin näytössä näkyvän parametrin koskettamalla mitä tahansa kolmesta näytetystä parametrilla. Valitse oikeaan yläkulmaan avautuvasta parametriluettelosta haluamasi parametri ja paina "Tallenna".

9. Toimenpiteiden merkintä: Kosketa lippukuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa merkitäksesi toimenpiteen. Syötä toimenpiteen nimi ja paina "Tallenna", jotta voit seurata toimenpiteen vaikutusta kuhunkin parametriin.



10. Kun haluat kytkeä Argos-laitteen pois päältä, valitse kolmen viivan kuvake näytön vasemmassa alakulmassa. Valitse "Sammutus".

