

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU MONITEUR DE DÉBIT CARDIAQUE ARGOS

1. Montage : assurez-vous que le moniteur ARGOS est solidement fixé à un support, une potence ou un bras avant de le mettre sous tension. Branchez l'appareil sur une prise murale CA à l'aide du câble d'alimentation fourni.



2. Mise sous tension : appuyez sur le bouton d'alimentation bleu et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Laissez l'appareil se charger complètement avant de l'utiliser. Le système Argos se met en marche comme un ordinateur.

3. Après le démarrage, l'écran « Ajouter les données patient » s'affiche. Saisissez les informations sur votre patient dans chaque champ. Vérifiez que toutes les données du patient ont été correctement saisies, puis appuyez sur « Enregistrer ».

Remarque : vous pouvez appuyer sur « Utiliser le patient précédent » si vous souhaitez revenir au patient le plus récemment surveillé avec le moniteur.



4. Acquisition du signal de PA : la ligne artérielle radiale ou fémorale existante du patient fournit le signal de PA au moniteur de chevet du patient. Aucun capteur ou transducteur de PA supplémentaire n'est nécessaire.



5. Branchement du système ARGOS au moniteur de chevet : votre moniteur de chevet se branche au port d'entrée du système ARGOS à l'aide du câble fourni avec le dispositif.



Câble entrée ARGOS



Port moniteur Spacelabs  
(Utiliser h1o1 pour P1 ; h1o2 pour P2)



Port moniteur GE



Port moniteurs Philip

Remarque : si les options illustrées ne correspondent pas à votre moniteur de chevet, veuillez consulter le représentant commercial de Retia Medical.



Scanner pour  
visualiser la vidéo  
de démarrage




# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU MONITEUR DE DÉBIT CARDIAQUE ARGOS

6. « Sélection de la source du signal de pression artérielle » : sélectionnez « Moniteur de chevet ».




7. Affichage de l'écran des tendances : pour confirmer que le moniteur de chevet transmet la forme d'onde de la PA du patient, vérifiez qu'elle s'affiche sur l'écran.

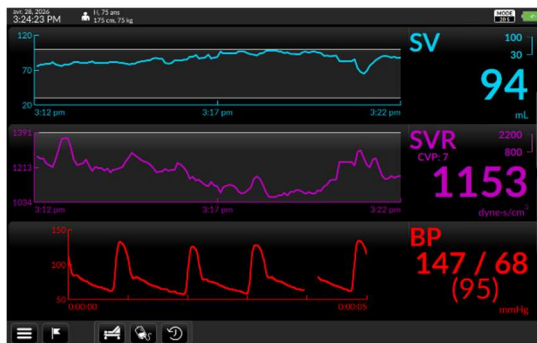

8. Modification des paramètres affichés : pour sélectionner un paramètre différent que celui qui est affiché, touchez l'un des trois paramètres affichés sur l'écran. Dans la liste déroulante des paramètres dans le coin supérieur gauche, sélectionnez le paramètre désiré, puis appuyez sur « Enregistrer ».

9. Marquage des interventions : touchez le drapeau en bas à gauche de l'écran pour marquer une intervention. Saisissez le nom de l'intervention et appuyez sur « Enregistrer » pour suivre l'effet de votre intervention sur chaque paramètre.

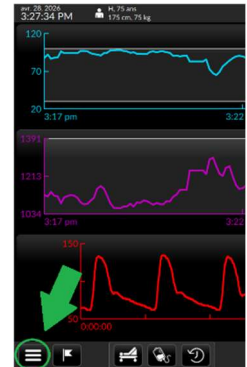

10. Mise hors tension du système Argos en cliquant sur l'icône à trois lignes en bas à gauche de l'écran. Sélectionnez « Arrêt ».

