

KURZANLEITUNG FÜR DEN ARGOS HERZZEITVOLUMEN-MONITOR

1. Befestigung: Darauf achten, dass der ARGOS-Monitor vor dem Einschalten sicher an einem Stativ, einer Stange oder einem Arm befestigt ist. Den Monitor mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine funktionierende Steckdose anschließen.



2. Einschalten: Den blauen Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät vor dem Gebrauch vollständig aufladen. Der Argos-Monitor startet wie ein Computer.

3. Nach dem Hochfahren erscheint der Bildschirm „Patientendaten hinzufügen“. In jedes Feld die entsprechenden Patientendaten eintragen. Die korrekte Eingabe aller Patientendaten überprüfen und anschließend auf „Speichern“ tippen.


Hinweis: Durch Tippen auf „Vorherigen Patienten verwenden“ kann direkt der zuletzt überwachte Patient aufgerufen werden.



4. Erfassen des Blutdrucksignals: Das Blutdrucksignal wird über den vorhandene Radialis- oder Femoralis-Zugang an den Patientenmonitor übertragen. Es ist kein zusätzlicher Blutdrucksensor oder -wandler erforderlich.



5. Verbinden des ARGOS mit dem Patientenmonitor: Die Verbindung zwischen Patientenmonitor und ARGOS-Eingang erfolgt über das dem ARGOS-Gerät beiliegende Kabel.

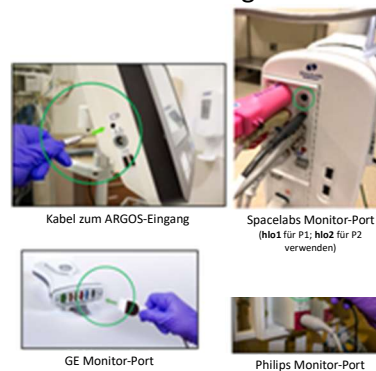

Hinweis: Falls die angezeigten Optionen für den vorhandenen Patientenmonitor nicht zutreffen, einen Retia Medical-Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.



Scannen zur Anzeige eines Startup-Videos




KURZANLEITUNG FÜR DEN ARGOS HERZZEITVOLUMEN-MONITOR

6. Auswählen der Blutdrucksignalquelle:
Die Option „Patientenmonitor“ auswählen.



7. Der Bildschirm mit den Trends wird angezeigt: Die Anzeige der Blutdruckkurve des Patienten auf dem Bildschirm dient als Bestätigung der Übertragung der Blutdruckkurve vom Patientenmonitor.

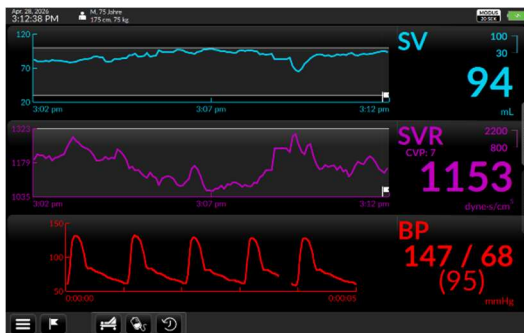

8. Ändern der angezeigten Parameter:
Zur Auswahl eines anderen Parameters als angezeigt auf einen der drei vorhandenen Parameter tippen. Den gewünschten Parameter in der Dropdown-Liste oben links auswählen und anschließend auf „Speichern“ tippen.

9. Kennzeichnen von Interventionen:
Auf das Flaggensymbol unten links im Bildschirm tippen, um eine Intervention zu markieren. Die Bezeichnung der Intervention eingeben und auf „Speichern“ tippen, um die Auswirkung der jeweiligen Intervention auf die einzelnen Parameter zu verfolgen.



10. Den Argos über die drei horizontalen Linien unten links im Bildschirm ausschalten. „Herunterfahren“ auswählen.

