

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ARGOS


1. Τοποθέτηση: Βεβαιωθείτε ότι το μόνιτορ ARGOS έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια σε βάση, ιστό ή βραχίονα, προτού το ενεργοποιήσετε. Συνδέστε τη μονάδα σε μια παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος που λειτουργεί, χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται.




2. Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το μπλε κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Αφήστε τη μονάδα να φορτίσει πλήρως πριν από τη χρήση. Η μονάδα Argos ενεργοποιείται σαν υπολογιστής.

3. Μετά την εκκίνηση, εμφανίζεται η οθόνη Add Patient Data (Προσθήκη δεδομένων ασθενούς). Εισαγάγετε τα στοιχεία του ασθενούς στο κάθε πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά όλα τα δεδομένα του ασθενούς και, στη συνέχεια, πατήστε Save (Αποθήκευση).


Σημείωση: Εάν θέλετε να επιστρέψετε στον ασθενή που παρακολουθούσατε πιο πρόσφατα, μπορείτε να πατήσετε "Χρήση προηγούμενου ασθ".

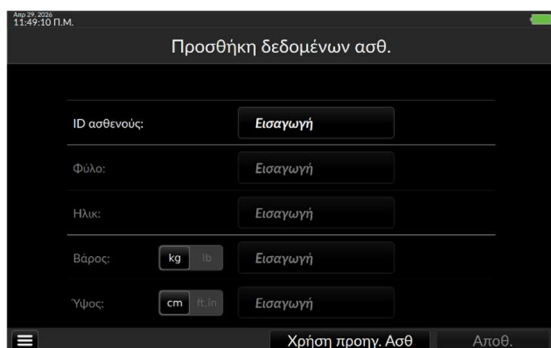

4. Λήψη του σήματος αρτηριακής πίεσης: Η υφιστάμενη κερκιδική ή μηριαία αρτηριακή γραμμή του ασθενούς παρέχει το σήμα αρτηριακής πίεσης στο παρακλίνιο μόνιτορ του ασθενούς. Δεν απαιτείται πρόσθετος αισθητήρας ή μορφοτροπέας αρτηριακής πίεσης.

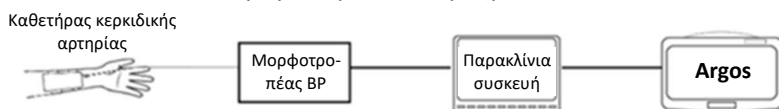

5. Συνδέστε το ARGOS στο παρακλίνιο μόνιτορ: Το παρακλίνιο μόνιτορ σας συνδέεται στη θύρα εισόδου του ARGOS με τη χρήση του καλωδίου που συνοδεύει το ARGOS.

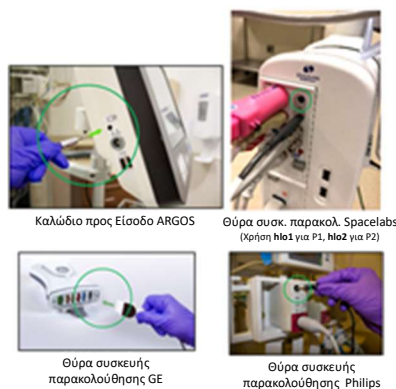


Σημείωση: Εάν οι επιλογές που εμφανίζονται δεν ισχύουν για το παρακλίνιο μόνιτορ σας, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία πωλήσεων της Retia Medical που σας εξυπηρετεί.



Σαρώστε για βίντεο
έναρξης



6. Επιλέξτε πηγή σήματος αρτηριακής πίεσης: Επιλέξτε Παρακλίνιο μόνιτορ.

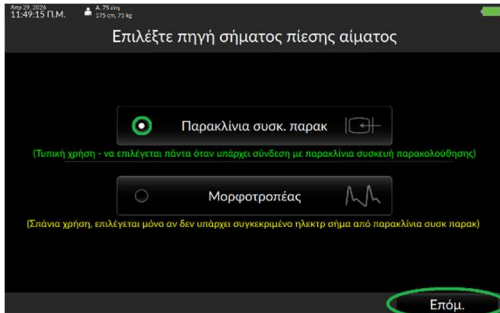

7. Εμφανίζεται η οθόνη τάσεων: Για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε την κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης από το παρακλίνιο μόνιτορ, επαληθεύστε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η κυματομορφή της αρτηριακής πίεσης του ασθενούς.



8. Αλλαγή των παραμέτρων που εμφανίζονται: Για να επιλέξετε διαφορετική παράμετρο από εκείνη που εμφανίζεται, αγγίξτε την οθόνη σε οποιαδήποτε από τις τρεις παραμέτρους που εμφανίζονται. Χρησιμοποιώντας την αναπτυσσόμενη λίστα παραμέτρων επάνω αριστερά, επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί “Αποθ.”.

9. Επισήμανση παρεμβάσεων με σημαία: Αγγίξτε τη σημαία στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης για να επισημάνετε μια παρέμβαση. Εισαγάγετε το όνομα της παρέμβασης και πατήστε το κουμπί “Αποθ.” για να παρακολουθήσετε την επίδραση της παρέμβασής σας σε κάθε παράμετρο.



10. Απενεργοποιήστε το Argos με τις τρεις γραμμές στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Επιλέξτε “Τερματισμό λειτουργίας”.

