

# GUIDA RAPIDA AL MONITOR PER GITTATA CARDIACA ARGOS

1. Montaggio: prima dell'accensione, assicurarsi che il monitor ARGOS sia montato saldamente su un supporto, un'asta o un braccio. Collegare l'unità a una presa di corrente c.a. utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.



2. Accensione: tenere premuto il pulsante di alimentazione blu per 5 secondi. Attendere che l'unità si carichi completamente prima di usarla. Argos si accende come un computer.


3. Dopo l'avvio, verrà visualizzata la schermata "Aggiungi dati paziente". Inserire le informazioni del paziente in ciascun campo.

Verificare che tutti i dati del paziente siano stati inseriti correttamente, quindi premere "Salva".


Nota: è possibile premere "Paziente precedente" se si desidera tornare all'ultimo paziente monitorato.



4. Acquisizione del segnale BP (pressione arteriosa): la linea arteriosa radiale o femorale già presente fornisce il segnale BP al monitor del paziente. Non sono necessari ulteriori sensori o trasduttori della pressione arteriosa.

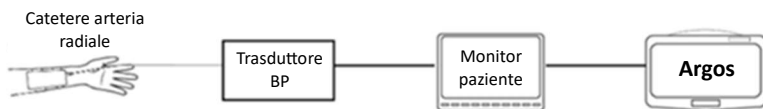

5. Collegare ARGOS al monitor del paziente: il monitor del paziente si collega alla porta di ingresso di ARGOS tramite l'apposito cavo in dotazione.

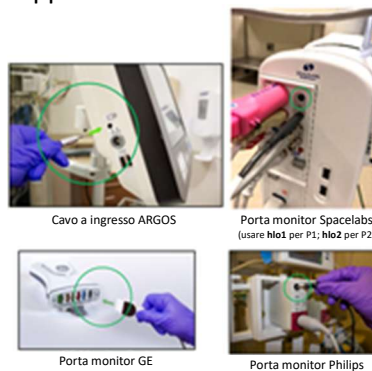

Nota: se le opzioni mostrate non sono applicabili al monitor del paziente in uso, consultare il rappresentante commerciale di Retia Medical.



Inquadrare per vedere un video introduttivo



# GUIDA RAPIDA AL MONITOR PER GITTATA CARDIACA ARGOS

6. Scegliere la sorgente del segnale della pressione arteriosa: selezionare "Monitor paziente".




7. Verrà visualizzata la schermata dei trend: per confermare la ricezione del segnale della pressione arteriosa (BP) dal monitor del paziente, verificare che la relativa forma d'onda sia visualizzata sullo schermo.



8. Modifica dei parametri visualizzati: per selezionare un parametro diverso da quello visualizzato, toccare uno dei tre parametri mostrati sullo schermo. Selezionare il parametro desiderato dall'elenco a discesa dei parametri in alto a sinistra, quindi premere "Salva".

9. Aggiungere indicatori per gli interventi: toccare l'icona della bandiera in basso a sinistra sullo schermo per contrassegnare un intervento. Inserire il nome dell'intervento, quindi premere "Salva" per monitorarne l'effetto su ciascun parametro.

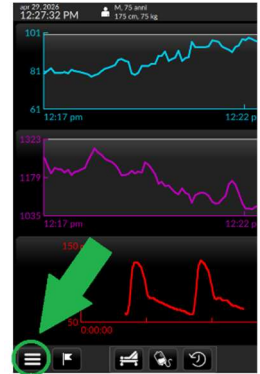

10. Spegnere Argos toccando le tre linee in basso a sinistra sullo schermo. Selezionare "Arresta".

