

# GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS

1. Instalação: certifique-se de que o monitor ARGOS esteja instalado de forma segura em um suporte, haste ou braço antes de ligá-lo. Conecte o equipamento a uma tomada de alimentação elétrica de CA utilizando o cabo de energia incluído.



2. Ligar: pressione e mantenha pressionado o botão azul de energia por 5 segundos. Deixe o equipamento carregar completamente antes do uso. O Argos inicializa como um computador.

3. Após a inicialização, a tela “Adicionar dados do paciente” é exibida. Insira os dados do paciente nos respectivos campos. Verifique se todos os dados do paciente foram inseridos corretamente e, em seguida, toque em “Salvar”.

Observação: se quiser retornar ao paciente monitorado mais recentemente, toque em “Utilizar paciente anterior”.



4. Aquisição do sinal de pressão arterial (PA): a linha arterial radial ou femoral existente do paciente fornece o sinal de PA ao monitor à beira do leito. Nenhum outro sensor ou transdutor de PA é necessário.



5. Conectar o ARGOS ao monitor à beira do leito: seu monitor à beira do leito conecta-se à porta de entrada do ARGOS por meio do cabo incluso com o ARGOS.



Observação: se as opções exibidas não forem aplicáveis ao seu monitor à beira do leito, consulte um representante de vendas da Retia Medical.



Digitalize para ver o vídeo de inicialização



# GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS

6. Selecionar a fonte do sinal de pressão arterial: selecione “Monitor à beira do leito”.




7. A tela de tendências é exibida: para confirmar que você está recebendo a forma de onda de PA do seu monitor à beira do leito, verifique se a forma de onda de PA do paciente é exibida na tela.



8. Alteração dos parâmetros exibidos: para selecionar um parâmetro diferente do exibido, toque na tela em qualquer um dos três parâmetros apresentados. Usando a lista suspensa de parâmetros no canto superior esquerdo, selecione o parâmetro desejado e, em seguida, toque em “Salvar”.

9. Marcar intervenções: toque no ícone de bandeira no canto inferior esquerdo da tela para marcar uma intervenção. Insira o nome da intervenção e toque em “Salvar” para acompanhar o efeito da intervenção em cada parâmetro.

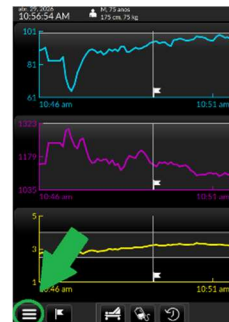

10. Desligar o Argos utilizando o menu de três linhas no canto inferior esquerdo da tela. Selecione “Encerrar”.

