

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS

1. Montagem: certifique-se de que o monitor ARGOS está instalado de forma segura num suporte, haste ou braço antes de o ligar. Ligue o equipamento a uma tomada de CA utilizando o cabo de alimentação incluído.




2. Ligação: prima e mantenha premido o botão azul de alimentação durante 5 segundos. Deixe o equipamento carregar completamente antes de o utilizar. O Argos arranca como um computador.

3. Após o arranque, é apresentado o ecrã “Adicionar dados do paciente”. Introduza os dados do paciente nos respetivos campos. Verifique se todos os dados do paciente foram introduzidos corretamente e, em seguida, toque em “Guardar”.

Nota: se pretender voltar ao paciente monitorizado mais recentemente, toque em “Utilizar paciente anterior”.



4. Aquisição do sinal de pressão arterial (PA): a linha arterial radial ou femoral existente do paciente fornece o sinal de PA ao monitor de cabeceira. Não são necessários sensores ou transdutores de PA adicionais.

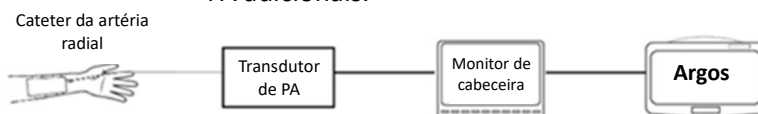

5. Ligação do ARGOS ao monitor de cabeceira: o monitor de cabeceira liga-se à porta de entrada do ARGOS através do cabo incluído com o ARGOS.



Nota: se as opções apresentadas não forem aplicáveis ao seu monitor de cabeceira, consulte o seu representante de vendas da Retia Medical.



Leia para ver o vídeo de arranque




GUIA DE INÍCIO RÁPIDO DO MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO ARGOS


6. Seleção da fonte do sinal de pressão arterial: selecione “Monitor de cabeceira”.




9. Sinalização de intervenções: toque no ícone de sinalização no canto inferior esquerdo do ecrã para marcar uma intervenção. Introduza o nome da intervenção e prima “Guardar” para acompanhar o efeito da intervenção em cada parâmetro.

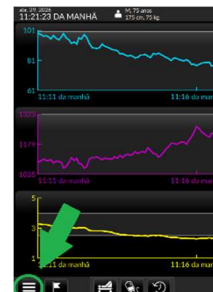

7. O ecrã de tendências é apresentado: para confirmar que está a receber a forma de onda de PA do monitor de cabeceira, verifique se a forma de onda de PA do paciente é apresentada no ecrã.

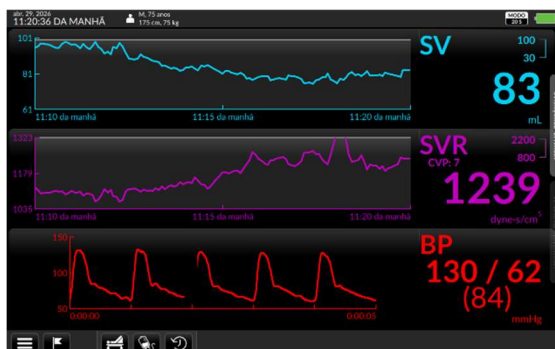

10. Encerramento do Argos através do menu de três linhas no canto inferior esquerdo do ecrã: selecione “Encerrar”.

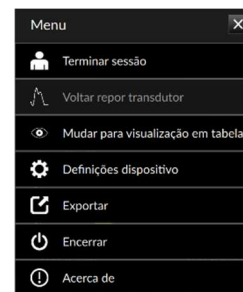

8. Alteração dos parâmetros apresentados: para selecionar um parâmetro diferente do apresentado, toque no ecrã em qualquer um dos três parâmetros apresentados. Utilizando a lista pendente de parâmetros no canto superior esquerdo, selecione o parâmetro pretendido e, em seguida, prima “Guardar”.

