

# MONITOR DE GASTO CARDÍACO ARGOS: GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Montaje: compruebe que el monitor ARGOS esté montado de manera segura sobre un soporte, poste o brazo antes de encenderlo. Conecte la unidad a una toma de corriente (CA) usando el cable de alimentación suministrado.



4. Adquisición de la señal de presión arterial: la vía arterial (radial o femoral) que ya tenga el paciente servirá la señal de presión arterial al monitor de cabecera. No se necesita un sensor de presión arterial o transductor adicional.



2. Encendido: mantenga pulsado el botón azul de encendido durante 5 segundos. Deje que la unidad se cargue por completo antes de utilizarla. El Argos se enciende como un ordenador.

3. Tras el arranque, aparecerá la pantalla “Añadir datos de paciente”. Escriba la información del paciente en cada campo. Compruebe que ha escrito correctamente todos los datos del paciente y, a continuación, pulse “Guardar”.

Nota: Puede pulsar “Usar paciente anterior” si desea volver al último paciente con el que usó el monitor.



5. Conexión del ARGOS al monitor de cabecera: el monitor de cabecera se conecta al puerto de entrada del ARGOS usando el cable suministrado con el propio ARGOS.



Nota: Si las opciones que se muestran no corresponden a su monitor de cabecera, consulte con su representante de Retia Medical.




Escanear para acceder a un vídeo de iniciación




# MONITOR DE GASTO CARDÍACO ARGOS: GUÍA DE INICIO RÁPIDO

6. Seleccione Fuente de señal de presión arterial: Seleccione “Monitor de cabecera”.

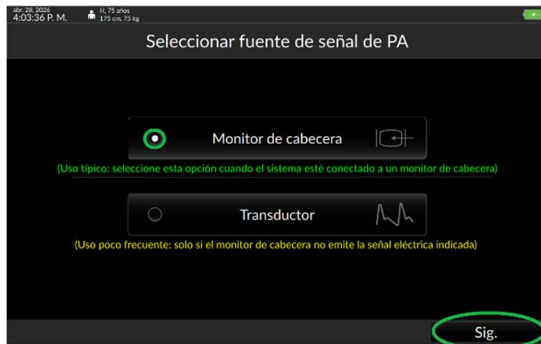


7. Aparecerá la pantalla de tendencias: para confirmar que está recibiendo la forma de onda de presión arterial del monitor de cabecera, compruebe que aparece en pantalla la forma de onda de presión arterial correspondiente al paciente.

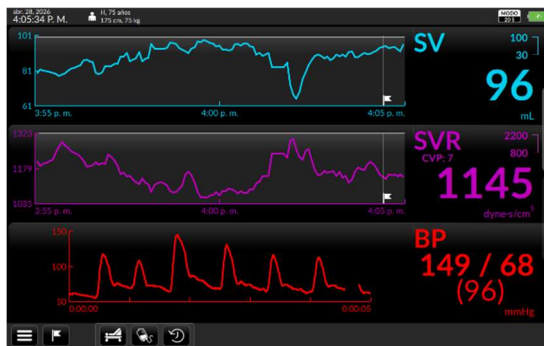

8. Modificación de los parámetros mostrados: para seleccionar un parámetro diferente del que se está mostrando, toque sobre cualquiera de los tres parámetros en la pantalla. Usando la lista desplegable de parámetros de la parte superior izquierda, seleccione el parámetro deseado y luego pulse “Guardar”.

9. Marcado de intervenciones: toque la marca en la parte inferior izquierda de la pantalla para resaltar una intervención. Escriba el nombre de la intervención y pulse “Guardar” para observar el efecto de su intervención sobre cada parámetro.

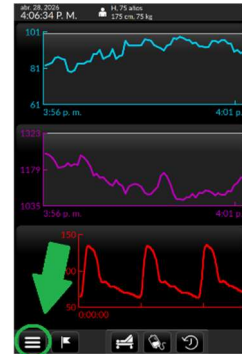

10. Apague el Argos usando el icono de las tres líneas que figura en la parte inferior izquierda de la pantalla. Seleccione “Apagar”.

