

SNABBSTARTSGUIDE TILL ARGOS HJÄRTMINUTVOLYMMONITOR

1. Montering: Säkerställ att ARGOS-monitorn är säkert monterad på ett stativ, en stång eller en arm innan du slår på den. Anslut enheten till ett fungerande nätströmsuttag med hjälp av den medföljande nätkabeln.



2. Slå på: Tryck på och håll in den blå strömbrytaren i 5 sekunder. Låt enheten laddas upp helt före användning. Argos startar upp på samma sätt som en dator.

3. Efter start visas skärmen Add Patient Data (för in patientuppgifter). För in informationen om din patient i varje fält. Kontrollera att du har fört in alla patientuppgifter korrekt och tryck sedan på "spara".

Anm: Du kan trycka på "använd föregående patient" om du vill gå tillbaka till den senast övervakade patienten.

A screenshot of the ARGOS monitor's 'Lägg till patientdata' (Add Patient Data) screen. The screen is dark with white text and input fields. It includes fields for Patient-ID, Kön (Gender), Ålder (Age), Vikt (Weight) with units kg and lb, and Längd (Height) with units cm and ft.in. Each field has an 'Ange' (Enter) button. At the bottom, there are buttons for 'Anv. föreg. patient' (Use previous patient) and 'Spara' (Save).

4. Hämta in blodtryckssignalen: Patientens befintliga artärkateter i arteria radialis eller femoralis sänder blodtryckssignalen till patientövervakningsmonitorn. Ingen ytterligare blodtryckssensor eller -givare krävs.



5. Anslut ARGOS till patientövervakningsmonitorn: Patientövervakningsmonitorn ansluts till ARGOS-ingångsporten via den kabel som medföljer ARGOS.



Kabel till ARGOS-ingång



Spacelabs monitorport
(Använd h1o1 för P1; h1o2 för P2)



GE monitorport



Philips monitorport

Obs! Rådfråga Retia Medicals försäljningsrepresentant om de visade alternativen inte stämmer med patientövervakningsmonitorn på din avdelning.



Skanna här för att se en video om att starta upp



SNABBSTARTSGUIDE TILL ARGOS HJÄRTMINUTVOLYMMONITOR

6. Välj blodtryckssignalkälla: Välj "patientövervakningsmonitor".




7. Trendskärmen visar: För att bekräfta att du får blodtryckskurvan (BP) från patientövervakningsmonitorn, kontrollera att patientens blodtryckskurva (BP) visas på skärmen.



8. Ändra de visade parametrarna: För att välja en annan parameter än den visade, peka på skärmen på någon av de tre visade parametrarna. Välj den önskade parametern på rullgardinslistan med parametrar upptill på vänster sida och tryck sedan på "spara".

9. Flagga interventioner: Peka på flaggan längst ned till vänster på skärmen för att markera en intervention. Ange namnet på interventionen och tryck på "spara" för att följa effekten av interventionen på varje parameter.

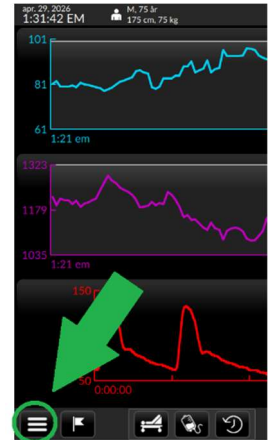

10. Stäng av Argos med hjälp av de tre linjerna längst ned till vänster på skärmen. Välj "stäng av".

